

playcare® Chodítko pro seniory
CARE ONE



Instruktažní návod, návod k použití

Komponenty





CZ

1. Ruční brzda
2. Madlo
3. Aretační tlačítko brzdy
4. Výškové nastavení madla
5. Zadní kapsa
6. Pojistka při složení
7. Nastavení blokace předních kol
8. Odnímatelná taška/vak s uchy
9. Sedadlo
10. Boční opěra
11. Opěradlo s kapsou na zip
12. Reflexní bezpečnostní odrazky

Výrobek je určen výhradně k přepravě každodenních nákupů a potřeb do domácnosti. Nedovolujte dětem stoupat si na kteroukoliv část vozíku/ chodítka. Nelze používat místo kočárku. Nedávejte dovnitř domácí zvířata. Nejtěžší předměty pokládejte vždy na dno tašky. Vždy rovnoměrně rozložte nákup po dně tašky. Na spodek dávejte předměty těžší. V rámci možností používejte přístupové rampy určené pro osoby se sníženou pohyblivostí. Vezete –li v tašce nákup, dávejte pozor při sjíždění z obrubníků, ramp a nerovností, aby se nepřevrátila.

Nepoužívejte pohyblivé schody. Znečištěná místa čistěte vlhkým hadříkem. V žádném případě nepoužívejte abraziva či rozpouštědla. Textilní díly, jsou-li odnímatelné, doporučujeme dát do čistírny chemicky čistit, mohou obsahovat materiály, které se nemohou prát (např. výplňové rouno).

RUČNÍ BRZDA ZADNÍCH KOL

Přitáhnete ruční brzdu (poz.č.1) k sobě. Po celou dobu přitahu jsou zadní kola bržděna.




TRVALÁ BLOKACE ZADNÍCH KOL

Zvednout ruční brzdu (poz.1) směrem k madlu a zajistit stisknutím aretačního tlačítka (poz.3)




ODBLOKOVÁNÍ ZADNÍCH KOL Opakovaným zvednutím ruční brzdy (poz.1) k madlu se kola odbrzdí a vozík dá opět do pohybu

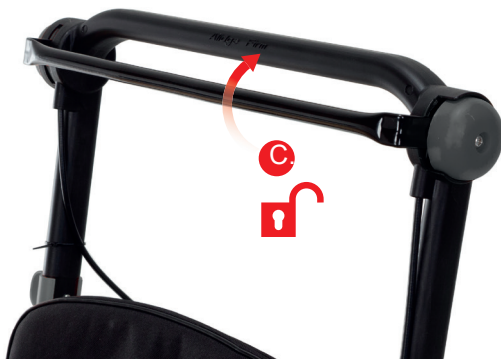

NASTAVENÍ REŽIMU PŘEDNÍCH KOL Posuvem svislého táhla zepředu na středové tyči mezi kolečky zvolíte jednu z variant :

Horní poloha : Kolečka nelze natáčet, možný je pohyb jen v přímém směru **Střední poloha** : Vytočení koleček maximálně do úhlu 45° na obě strany **Spodní poloha** : Otáčivý pohyb koleček není omezen

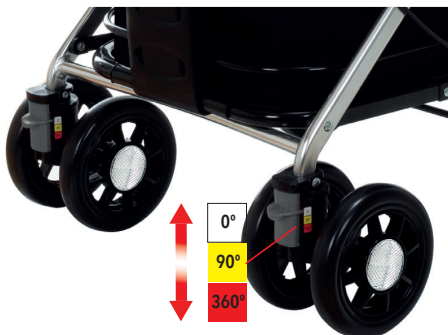

NASTAVENÍ VÝŠKY MADLA

Vysunout boční plastový ochranný prvek s kolíkem, madlo nastavit na požadovanou výšku a polohu opět zajistit. Na výběr jsou 4 polohy. Výška madla od země v rozsahu 84 cm až 94 cm od země.



SEDADLO

Sedák lze zvednout a v prostoru pod ním je umístěna nákupní taška. Opěradlo s kapsou na zip ze zadní strany.



PROSTOR POD SEDADLEM. Určen pro nákupní tašku s uchy. Objem 30 L.





POZOR

Je striktně zakázáno používat nákupní vozík jako kolečkovou židli či křeslo. Nákupní vozík je vybaven bezpečnostní brzdou nezbytnou pro použití vozíku jako sedadla. Maximální zatížení uživatelem sedadla : 120 kg.

ROZMĚRY



ROZMĚRY PŘI ROZLOŽENÍ
50 x 50 x 84~88 cm

ROZMĚRY VE SLOŽENÉM TVARU
50 x 29 x 93 cm

VÝŠKA SEDADLA OD ZEMĚ : 48 cm

HMOTNOST : 6 kg.

Testováno podle DIN EN ISO 11199-2



ET4935PP

CZ

Uschovejte si stvrzenku pro uplatnění případných práv jako spotřebitel. Společnost si vyhrazuje právo provádět změny na produktu s ohledem na popis uvedený v tomto návodu k použití.

DŮLEŽITÉ INFORMACE OHLEDNĚ POUŽÍVÁNÍ VOZÍKU BĚHEM PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO OBDOBÍ :

Dbejte na zvýšenou opatrnost při výjezdu v období, kdy se předpokládá kluzké prostředí nebo hrozí-li tvorba náledí. V takovém případě doporučujeme chodit s vozíkem velmi opatrně, případně s doprovodem druhé osoby. Doporučujeme vyhodnotit, zdali je zvolená cesta za nákupem dostatečně udržovaná. Své chování přizpůsobte stavu cesty a chovejte se obezřetně.

PLAYGroup

P

Produkt info : info@framart.cz